

INSTRUKCJA PIELĘGNACJI UŻYWANIA

Proteza włosów - Peruka



Przed przystąpieniem do używania wyrobu, należy uważnie zapoznać się z treścią niniejszej Instrukcji Używania. W celu prawidłowego stosowania wyrobu, należy przestrzegać wszystkich zaleceń i wskazówek podanych w Instrukcji. Wyrób należy stosować zgodnie z przewidzianym przez wytwórcę zastosowaniem.

PRZEZNACZENIE WYROBU

Wyrób medyczny proteza włosów- peruka może być stosowana u pacjentów leczonych neurochirurgicznie, dermatologicznie (np. łysienie plackowate), onkologicznie. Wskazanie bezpośrednie dla stosowania wyrobu – dla osób w przebiegu leczenia chorób nowotworowych podczas okresowej lub trwałej utraty owłosienia głowy, przy trwałym uszkodzeniu głowy w wyniku urazów, oparzeń lub chorób współistniejących, np. wyleczone stany pourazowe / pooparzeniowe skutkujące trwałą utratą częściową lub całkowitą włosów, deformacje pourazowe głowy.

UŻYWANIE PERUKI

Przed nałożeniem peruki należy dostosować wielkość peruki do obwodu głowy - regulacja za pomocą rzepek wewnętrznych. Peruki o włosach prostych można czesać szczotką lub układać palcami.

Peruki o włosach kręconych należy układać wyłącznie palcami.

Do układania fryzury można używać lakierów przeznaczonych do tego celu.

Po nałożeniu peruki dopasować fryzurę do własnych preferencji.

Po zdjęciu peruki należy uformować jej kształt, najlepiej na stojaku, w taki sposób aby nie doszło do załamań włosów.

W przypadku uszkodzenia wewnętrznej siatki peruki, rozprucia szwów itp. zaleca się wymianę peruki na nową. Producent zastrzega, iż gwarancji nie podlegają uszkodzenia mechaniczne związane z niewłaściwym użytkowaniem i niewłaściwą pielęgnacją peruki.

PIELĘGNACJA I PRANIE PERUKI

Do prania peruki można używać wyłącznie szamponu do peruk.


Do około 2 litrów chłodnej wody dodać 1 łyżkę stołową szamponu. Perukę całkowicie zamoczyć w przygotowanej kąpieli piorącej i pozostawić w niej na około 5 – 15 minut w zależności od stopnia zabrudzenia. Nie szorować, nie trzeć, nie wygniatać peruki. Delikatnie wyjąć perukę i dokładnie wypłukać w zimnej wodzie (nie pod bieżącą wodą). Zaleca się minimum dwukrotne płukanie. Do ostatniego płukania można dodać odżywkę w ilości

1 nakrętki na 2 litry wody. Perukę pozostawić do wysuszenia najpierw rozłożoną na ręczniku, później lekko wilgotną na stojaku, w temperaturze pokojowej. Po wyschnięciu peruka powraca do stanu pierwotnego.

ZALECENIA DOTYCZĄCE UŻYWANIA

- W celu zagwarantowania odpoczynku skóry, lepszego jej ukrwienia, jak także zapewnienia filtracji i cyrkulacji powietrza zaleca się noszenie peruki nie dłużej niż 16 godzin, najlepiej z przerwą nocną.
- Nie należy stosować żadnych dodatkowych mocowań w postaci klejów, plastrów itp.
- Nie zaleca się czesania mokrych włosów peruki
- Nie zaleca się czesania włosów kręconych także suchych
- Nie wolno kręcić włosów na wałkach niezależnie od rodzaju wałków

OSTRZEŻENIA

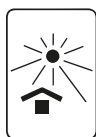

- Perukę należy stosować wyłącznie na nieuszkodzoną skórę. Można używać peruki na opartunki. W razie potrzeby należy skonsultować się z lekarzem.
- Nie wolno używać suszarek i lokówek do układania fryzury
- Unikać wysokich temperatur (sauna, solarium, grill, piekarnik, ognisko)

W razie problemów prosimy o kontakt z Wytwórcą



AUTORYZOWANY PRZEDSTAWICIEL
WYTWÓRCA

PERUKPOL S.C. A. ŁUCZAK M. MOCNA J. BUCHLA
ul. Korzeniowskiego 5, 02-049 Warszawa
tel. 22 631 24 92, tel./fax 22 631 24 91
www.perukpol.pl, e-mail: perukpol@perukpol.pl